

Perguntas Frequentes¹

O que é a Gastroplastia Endoscópica em Sleeve (ESG) e como funciona?

A **ESG** é um procedimento endoscópico sem incisões realizado por um gastroenterologista ou cirurgião com especialização em endoscopia que sutura o estômago com um dispositivo exclusivo chamado Sistema **Overstitch™**, a **ESG** reduz o tamanho do estômago e isso limita a quantidade de alimento consumido e o número de calorias absorvidas pelo estômago. Também prolonga o tempo que os alimentos permanecem no estômago, fazendo com que o paciente se sinta satisfeito por mais tempo².

Quanto peso posso esperar perder após a ESG?

De acordo com estudos clínicos, os pacientes perderam 16,3%² e 18,2%³ do peso corporal em 12 meses após passarem pelo procedimento de ESG. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa.

O procedimento é permanente?

As suturas são feitas de material durável⁴, que não se dissolve. Com o tempo, haverá um processo de cicatrização que suporta a manutenção do tamanho reduzido do estômago. Contudo, ao longo do tempo, o reganho de peso pode ocorrer. Nestes casos, é possível realizar um novo procedimento com suturas adicionais⁵.

Quais são os efeitos colaterais mais comuns?

Os efeitos colaterais mais comuns são sintomas gastrointestinais, como náuseas, dor abdominal, vômitos, constipação, arrotos ou diarreia³.

Mesmo tratando-se de um procedimento endoscópico, há riscos que devem ser considerados. Os pacientes devem conversar com seu médico sobre essas possibilidades⁴.

Sou elegível para este procedimento?

O procedimento de ESG com o sistema Overstitch™ ou Overstitch SX™ da Boston Scientific é indicado para adultos com obesidade e índice de massa corporal (IMC) entre 30-50, que não conseguiram perder peso ou manter a perda de peso apenas com dieta e exercícios^{1,3}. Pacientes com restrições para realizar uma endoscopia alta, gestantes, usuários de certos tipos de medicamentos anticoagulantes ou portadores de patologias como câncer, hérnia hiatal, lesões gástricas potencialmente hemorrágicas ou distúrbios alimentares, não são elegíveis para o procedimento^{1,4}. Fale com seu médico para avaliar sua condição clínica e possibilidade de realizar o procedimento.

REFERÊNCIAS:

1. Endoscopic Sleeve Gastroplasty (ESG). Learn more about ESG. Disponível em: <<https://www.apolloendosurgery.com/us/en/esg.html>>. Acesso em: 25 ago. 2024.
2. ABU DAYYEH, B. K. et al. Endoscopic sleeve gastroplasty for treatment of class 1 and 2 obesity (MERIT): a prospective, multicentre, randomised trial. Lancet (London, England), v. 400, n. 10350, p. 441–4 51, 6 ago. 2022.
3. JIRAPINYO et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy–European Society of Gastrointestinal Endoscopy guideline on primary endoscopic bariatric and metabolic therapies for adults with obesity. Endoscopy, v. 56, n. 06, p. 437–456, 19 abr. 2024.
4. Instrução de Uso do produto Overstitch aprovada pela ANVISA – data de inclusão: 30/10/2023
5. BOŠKOSKI, I. et al. Redo endoscopic sleeve gastroplasty: technical aspects and short-term outcomes. Therapeutic Advances in Gastroenterology, v. 13, p. 1756284819896179, 20 jan. 2020.

ATENÇÃO: A lei restringe a venda desses dispositivos a médicos ou sob prescrição médica. As indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo ou em www.IFU-BSCI.com. Produtos mostrados apenas para fins INFORMATIVOS e podem não estar aprovados ou à venda em certos países. Este material não é destinado ao uso na França. 2024 Copyright © Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este material é apenas para fins informativos e não se destina a diagnóstico médico. Estas informações não constituem aconselhamento médico ou jurídico, e a Boston Scientific não faz nenhuma representação quanto aos benefícios médicos incluídos nessas informações. A Boston Scientific recomenda fortemente que você consulte seu médico sobre todos os assuntos relacionados à sua saúde.

ENDO – 1985914 – AA

